

Slik bytter du til mySugr-appen

Hurtigveiledning

Accu-Chek SmartGuide- og Predict-appene¹ flyttes nå over til mySugr-appen, og det er viktig at du gjør byttet i tide. Etter overgangsperioden vil nemlig nye Accu-Chek SmartGuide-sensorer kun kunne kobles til mySugr-appen.

Last ned
mySugr-appen nå!



Du bytter med bare noen få tastetrykk



Trinn 1
Last ned mySugr-appen



Trinn 2
Logg inn med din eksisterende konto




Trinn 3
Følg trinnene for en rask registrering

1.




Du får et varsel i Accu-Chek SmartGuide-appen som ber deg om å bytte.

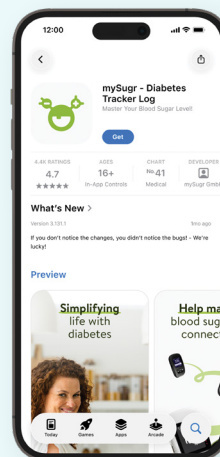

Last ned eller oppdater mySugr-appen i App Store eller Google Play

2.

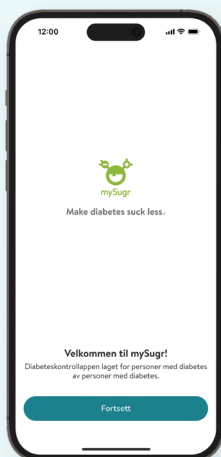


Åpne mySugr-appen og trykk på «Fortsett»



Du blir videresendt til Roche-plattformen for innlogging.




Skriv inn e-posten som er knyttet til din nåværende Accu-Chek-konto.

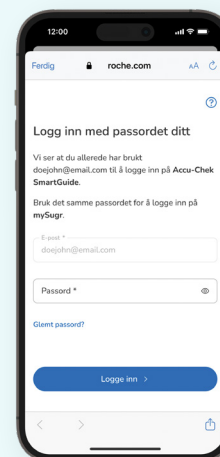


Logg deretter inn med passordet til Accu-Chek-kontoen din.

1. Accu-Chek SmartGuide-appen og Accu-Chek SmartGuide Predict-appen.


3.

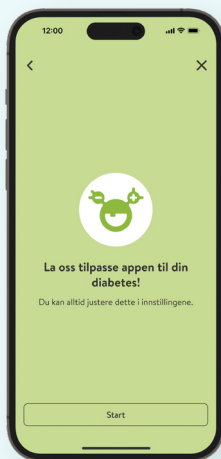

Når du er logget inn, følger du trinnene for en rask registrering

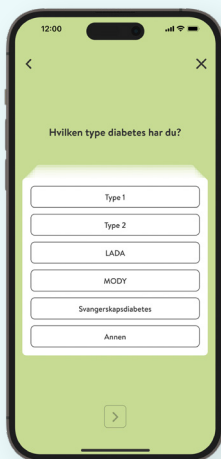


Legg inn diabetestype, insulinbehandling, medisiner, måleenhet og målområde for glukose.

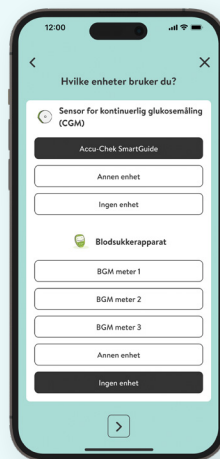

Velg «Accu-Chek SmartGuide» i listen over enheter.



Husk til slutt å tillate varsler.

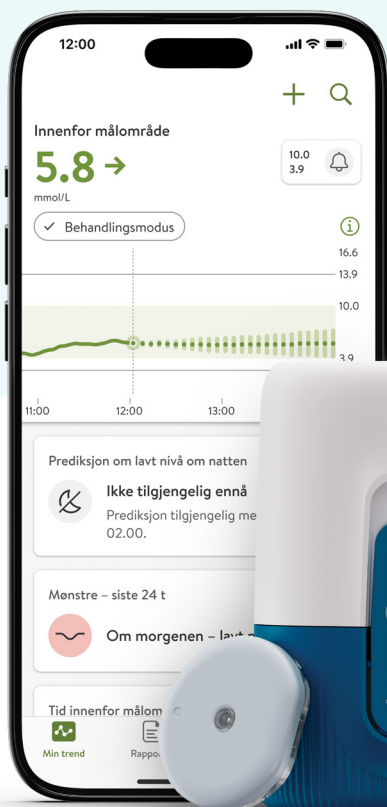

Alt er klart!

Etter registreringen er du klar til å koble din neste Accu-Chek SmartGuide-sensor til mySugr-appen.

Vi anbefaler at du bytter til mySugr-appen ved neste sensorbytte.

Trenger du hjelp?

Ta gjerne kontakt med vår kundeservice:

- Telefon: 800 26 530
- E-post: smartguide.no@roche.com



Finn ut mer

Skann QR-koden for å gå til nettsiden vår, der du finner mer informasjon om app-byttet.

