



FI Käyttöohje

Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin otat verinäytteen veripisarän muodossa sormenpästä.

Käyttötarkoitus

Lansettikynä
Accu-Chek Softclix -lansettikynä on tarkoitettu kapillaariverinäytteen ottamiseen sormenpästä helposti ja lähes kivuttomasti. Accu-Chek Softclix -lansettikynä on tarkoitettu vain potilaan henkilökohtaiseen käyttöön! Sitä saa käyttää vain yhden henkilön verinäytteen ottoon.

Jos toinen henkilö, perheenjäsenet mukaan luettuna, käyttää lansettikynää tai jos terveydenhuollon ammattilainen käyttää samaa lansettikynää verinäytteen ottoon useammilla henkilöillä, on olemassa infektioiden leviämisen riski. Tämä lansettikynä ei siksi sovelu ammattikäyttöön terveydenhuollon laitoksissa. Se ei ole steriili tuote.

Kohderyhmään kuuluvat diabeteksen omaseurainta toteuttavat henkilöt.

Lansetti

Accu-Chek Softclix -lansetti ja Accu-Chek Softclix XL -lansetti ovat steriilisiä yksittäisiä lansetteja, ja ne on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Accu-Chek Softclix -lansettikynän kanssa. Lansetti on kertakäyttöosa. Jokainen lansetti on tarkoitettu käytettäväksi vain kerran.

Accu-Chek Softclix -lansetti ja Accu-Chek Softclix XL -lansetti on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Accu-Chek Softclix -lansettikynän kanssa kapillaariverinäytteen ottamiseen helposti ja lähes kivuttomasti. Jokaisessa lansetissa on suojakappale, joka takaa lansetin steriilyyden ennen ensimmäistä käyttöä.

Käyttötaihe

Lansettikynä on tarkoitettu käytettäväksi diabeteksen omaseurainta.

Suunniteltu käyttäjä

Diabeetikot ja terveydenhuollon ammattilaiset tai hoitajat, jotka avustavat diabeetikkoja tuotteen käyttämisessä.

Kohderyhmä (ota tuote koske)

Lapsat, nuoret ja aikuiset, jolla diabetes.

Vasta-aiheet

Vasta-aiheita ei ole.

Kiinniset edut

Lansetin kanssa käytettynä lansettikynällä voidaan ottaa kapillaariverinäyte lähes kivuttomasti.

Yleistä tietoa turvallisuudesta

Käyttöohje sisältää varoituksia ja tietoa varoitusmerkeistä.

⚠️ **VAARA** osoittaa, että tilanteeseen voi liittyä vakava vaara.

⚠️ **VAROITUSMERKII** kertoo, mitä pitää tehdä käyttäessään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti tai estääkseen sen vaurioitumisen.

VAARA

Tukeytymisvaara
Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka nieltynä voivat aiheuttaa tukeytymisvaaran.

Pidä pienet osat poissa pienten lasten ja muiden sellaisten ihmisten ulottuvilta, jotka saattaisivat niellä pieniä osia.

Vamman riski

Jos pistosyyvyys on liian suuri, pistos voi vahingoittaa ihoa.

Kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta ennen kuin käytät lansettikynää lapsilla ensimmäistä kertaa. Aloita pienimmällä pistosyyvydellä.

Infektioriski

Jos lansettikynä tai lansetti on ollut kosketuksissa vereen, se voi levittää infektiota.

Lansettikynää ja lansetteja eivät saa käyttää muut henkilöt, eivät edes perheenjäsenet. Terveydenhuollon ammattilaiset eivät saa käyttää niitä verinäytteen ottamiseen eri ihmisillä.

Jos lansettikynä tai lansetti on pudonnut tai allistunut muulle mekaaniselle rasitukselle, tarkista ettei siinä ole vaurioita. Jos suojakappale puuttuu tai jokin muu osa on työntynyt esiin, älä käytä lansettikynää tai lansetteja, vaan hävitä se.

VAROITUSMERKII

Vamman riski

• Ihokosketus lansettikynän tai lansetin kanssa voi aiheuttaa ihovaurioita.

Jos ihosi ärttyi tai tulehtuu, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

• Jos lansetti pistetään kovaa pintaa vasten eikä ihoon, neula voi vaurioitua.

Käytä lansettia vain veripisarän ottamiseen.

• Lansettikynää käytettäessä sen osat (esim. virityspainike) voivat työntyä ulospäin.

Älä sauanta lansettikynää omia kasvojasi tai muuta ihmisiä kohti.

Käytä Accu-Chek Softclix -lansettikynässä vain Accu-Chek Softclix -lansetteja. Muut lansetit voivat aiheuttaa lansettikynässä toimintahäiriötä tai vaurioittaa sitä pysyvästi.

Lansettikynä on potilaakohtainen, ja sitä voidaan käyttää useita kertoja. Lansetti on steriili kertakäyttötuote, joka on steriloitu säilyttämällä.

Vinkkejä ja ohjeita

Jos et ole käyttänyt tätä lansettikynää aikaisemmin, aloita pienellä pistosyyvydellä, esim. 2:lla.

Kun painat virityspainiketta, älä paina laukaisupainiketta samanaikaisesti.

Lansettikynä on viritettu, kun laukaisupainikkeessa näkyy keltaisen piste.

Verinäyte voidaan ottaa periaatteessa mistä somesta tahansa. Sormi, jonka ihossa tai kynnessä on infekto, ei sovelu verinäytteen ottoon. Ota kapillaariverinäyte sormenpään sivulta, sillä näissä pistoskohdissa kipuutuminen on vähäisintä.

Jos verta ei tule riittävästi, paina lansettikynää napakammin ihoa vasten seuraavan verinäytteen oton yhteydessä. Jos verta ei edelleenkään tule riittävästi, suurenni myös pistosyyvyyttä asteittain. Jos verta tulee liika, pienennä pistosyyvyyttä.

Lansettikynän käyttö

VAARA

Infektioriski

• Jos lansetin suojakappale on vaurioitunut tai puuttuu, neula voi olla epästeriili ja aiheuttaa infektion.

Tarkasta lansetti silmämääräisesti. Jos suojakappale on väännyt, hajennut tai muuten vaurioitunut, älä käytä lansettia. Jos suojakappale puuttuu tai jokin muu osa on työntynyt esiin, älä käytä lansettia. Hävitä lansetti.

• Käytetty lansetti voi levittää infektiota.

Käytä lansettia vain kerran verinäytteen ottoon. Hävitä käytetty lansetti aina verinäytteen oton jälkeen.

• Harvoissa tapauksissa lansetti ei vetydy takaisin lansettikynän verinäytteen ottamisen jälkeen.

• Harvoissa tapauksissa lansetti ei vetydy takaisin lansettikynän verinäytteen ottamisen jälkeen. Tarkista, ettei lansetti työntynyt ulos verinäytteen ottamisen jälkeen. Jos lansetti työntynyt ulos, poista suojakappale varovasti. Poista ja hävitä lansetti.

VAROITUSMERKII

Infektioriski

• Pistoskohdan puhdistamatta jättäminen voi johtaa infektiin.

Puhdista pistoskohta ennen kuin otat verinäytteen.

• Jos lansetin viimeinen käyttöpäivämäärä on kulunut umpeen, lansetti voi olla epästeriili.

Käytä vain lansetteja, joiden viimeinen käyttöpäivämäärä ei ole vielä kulunut umpeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen symbolin vieressä.

Noudata kuvissa näkyviä ohjeita.

Mittaa verensokeri heti verinäytteen oton jälkeen verensokerimittarisi käyttöohjeen mukaisesti.

Käyttöolosuhteet

Käytä lansettikynää ja tarvikkeita seuraavissa käyttöolosuhteissa:

- Lämpötila-alue: +5 – +45 °C
- Suhteellinen kosteusalue: 5–90 %

Lansettikynän ja lansettien säilytys

Älä säilytä lansettikynää viritettynä. Älä säilytä lansettikynää ja lansetteja äärimmäisissä lämpötiloissa, kuten kuumassa autossa. Se voi aiheuttaa toimintahäiriötä lansettikynässä tai lanseteissa.

Säilytä lansettikynä aina ilman lansetteja.

Lansettikynän ja kärkiosan puhdistus ja desinfiointi

VAROITUSMERKII

Infektioriski

Jos lansettikynä tai kärkiosa on ollut kosketuksissa vereen, se voi levittää infektiota.

Puhdista ja desinfioidi lansettikynä ja kärkiosa aina ennen kuin joku muu käsittelee niitä esim. auttaessaan sinua.

Infektioiden leviämisen välttämiseksi lansettikynä ja kärkiosa on puhdistettava ja desinfioidava säännöllisesti.

• vähintään kerran viikossa

• jos lansettikynä tai kärkiosa on tahriintunut vereen

• aina ennen kuin toinen henkilö koskettaa lansettikynää esim. auttaessaan sinua.

Tarvitset 3 nukkaamatonta liinaa, vettä ja 70-prosentista isopropanolia. Desinfiointiin käytettävän liinan on oltava riittävin suuri, jotta lansettikynä voidaan kääriä sen sisään.

Veren ja epäpuhtauksien poistamiseksi lansettikynä ja kärkiosa on puhdistettava ennen desinfiointia.

Lansettikynän ja kärkiosan vahingoittumisen välttämiseksi

- älä upota lansettikynää ja kärkiosaa nesteeseen
- käytä puhdistuksessa vain vettä ja desinfiointissa vain 70-prosentista isopropanolia.

- ▶ Vedä lansettikynän kärkiosa irti.
- ▶ Poista lansetti.
- ▶ Kostuta ensimmäinen liina vedellä puhdistusta varten.
- ▶ Pyyhi lansettikynä ja kärkiosa huolellisesti kostetulla liinalla. Pyyhi lansettikynää vain ulkopuolelta ja kärkiosaa ulko- ja sisäpuolelta.
- ▶ Kuivaa lansettikynä ja kärkiosa toisella, kuivalla liinalla.
- ▶ Kostuta kolmas liina desinfiointia varten 70-prosenttisella isopropanolilla.
- ▶ Pyyhi sekä lansettikynää että kärkiosaa 2 minuutin ajan perusteellisesti isopropanolilla kostutetulla liinalla. Pyyhi lansettikynää vain ulkopuolelta ja kärkiosaa ulko- ja sisäpuolelta.
- ▶ Aseta kärkiosa takaisin paikalleen.
- ▶ Kääri lansettikynän kokonaan isopropanolilla kostutetun liinan sisään.
- ▶ Anna lansettikynän olla liinan käärittyä 8 minuutin ajan.
- ▶ Ota lansettikynä pois kääreestä ja anna sen kuivua ilmavassa paikassa.

Käytetyn lansetin hävittäminen

VAARA

Infektioriski

Käytetty lansetti voi levittää infektiota.

Käytetyn lansetin neula voidaan koskettaa vahingossa. Hävitä lansetti siksi siten, ettei lansetti aiheuta kenellekään vammoja. Laita lansetti esimerkiksi riskijätteenastiaan.

Lansettikynän hävittäminen

VAROITUSMERKII

Infektioriski

Jos lansettikynä on ollut kosketuksissa vereen, se voi levittää infektiota.

Hävitä käytetty lansettikynä tarjuntavaarailisena materiaalina maassasi voimassa olevien määräysten mukaan.

Hävitä käytetty lansettikynä muovijätteenä. Lisä tietoa lansettikynän oikeasta hävittämisestä saat paikalliselta viranomaiselta.

Tilustiedot

Jos haluat tilata Accu-Chek Softclix -tuotteita, ota yhteyttä asiakaspalveluun (katso kohta Asiakaspalvelu).

Vakavien vaaratilanteiden raportointi

Potilaalle / käyttäjälle / kolmansille osapuolille Euroopan unionin alueella ja maissa, joissa on samanlainen sääntelyjärjestelmä: jos tämän kalteen käytön aikana tai sen käytön vuoksi on syntynyt vakava vaaratilanne, raportoi siitä valmistajalle ja oman maasi kansalliselle viranomaiselle.

Viimeisin päivitys

2024-07

Asiakaspalvelu

Suomi
Asiakaspalvelupuhelin: 0800 92066 (maksuton)
www.accu-check.fi

FI

Accu-CHEK®
Softclix

Lansettikynä ja lansetti

	Noudata käyttöohjetta (sininen symboli)
	Katso käyttöohjetta tai katso sähköistä käyttöohjetta
	Käytettävä viimeistään
	Steriiloitu säilyttämällä
	Käytä vain kerran
	Potilaskohtainen – voidaan käyttää useita kertoja
	Pese kädet (sininen symboli)
	Valmistusajankohhta
	Lääkinnällinen laite
	Valmistaja
	Yksilöllinen laitetunniste
	Tuotenumero
	Eräkkoodi
	Sovellettaavan EU-lainsäädännön mukainen
	0123
	Koskee vain Ranskaa: Tuote ja/tai pakkaus on hävitettävä erikseen tai vietävä jätteenkeräyspisteeseen.

Accu-Chek Softclix -lansettikynä

Accu-Chek Softclix -lansetteja

ACCU-CHEK ja SOFTCLIX ovat Rochen tavaramerkkejä.

© 2025 Roche Diabetes Care GmbH Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim, Germany www.accu-check.com