

ACCU-CHEK® Mobile



Bruksanvisning og kort bruksanvisning

Blodsuktermålingssystem



ACCU-CHEK®



© 2015 Roche Diabetes Care

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK SMART PIX,
ACCU-CHEK 360° og FASTCLIX er varemerker for Roche.

CONTINUA, CONTINUA-Logos og CONTINUA CERTIFIED er varemerker,
service-merker eller kvalitetsmerker som tilhører Continua Health Alliance.
CONTINUA er et registrert varemerke i noen, men ikke i alle land hvor
produktet selges.

USB-IF-Logos er varemerker for Universal Serial Bus Implementers
Forum, Inc.

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

www.accu-chek.com

ACCU-CHEK®

07419511001(01) – 2015-06 M_Version02_Rev3

⚠ VIKTIGE HENVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING

En feil utført blodsuktermåling kan føre til ukorrekte måleresultater og dermed til uriktig behandling,
som kan resultere i alvorlige helseskader. **Følg** derfor henvisningene nøye for å utføre blodsuktermålingen på riktig måte.

	Riktig	Feil	Begrunnelse
1			En feil utført blodsuktermåling kan føre til falskt forhøyede måleresultater og til tilførsel av en for høy insulin dose. Det finnes følgende årsaker til falskt forhøyede resultater:
2			- Uvaskede, skitne eller klebrige fingre. - Dersom bloddråpen sprer seg på fingeren, eller hvis du stryker bloddråpen over testfeltet, øker risikoen for en forurensning av testfeltet (f.eks. på grunn av rester fra måltider eller drikkevarer på fingeren).
3			- Testfeltet trykkes på fingeren. - Urolige eller skjelvende bevegelser under blodsuktermålingen.
4			Blodsuktermålingen utføres ikke umiddelbart, eller fingeren holdes for lenge på testfeltet. Vær oppmerksom på varseltonen. Varseltonen hjelper deg til å oppnå et pålitelig måleresultat.



■ Apparatet og blodprøvetakeren er kun beregnet til personlig bruk!

De skal kun brukes av den samme personen for blodsuktermåling. Det oppstår infeksjonsfare dersom apparatet eller blodprøvetakeren også brukes av andre personer, også av familiemedlemmer, eller hvis helsepersonell bruker dette apparatet til å måle blodsukkeret av mer enn én person eller denne blodprøvetakeren til å ta blodprøve av mer enn én person.

■ Denne korte bruksanvisningen erstatter ikke den utførlige bruksanvisningen til Accu-Chek Mobile-blodsuktermålingssystemet ditt. Vær vennlig å lese nøye gjennom sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen og i testkassetts pakningsvedlegg.

ACCU-CHEK® Mobile



Kort bruksanvisning

Komme i gang

ACCU-CHEK®



- 1 Utløserknapp (klargjøre og stikke)
- 2 På/Av- og Enter-knapp
- 3 Ned-/Opp-knapper
- 4 Visning av gjenværende lansetter
- 5 Spak for å klargjøre en ny lansett
- 6 Dreibar hette for å stille inn stikkedybden
- 7 Beskyttelsesluke lukket (nede til høyre: åpnet)
- 8 Testfelt (klargjort på kassettspissen for målingen)
- 9 Lansettrommel
- 10 Sikkerhetslås for å kople fra blodprøvetakeren
- 11 Sikkerhetslås for å åpne kassettdেকেlet
- 12 Beskyttelsesluke
- 13 Testkassett

1. Ta blodsuktermålingssystemet i bruk

1



Åpne testkassettenes pakning ved perforasjonen. Ta ut plastemballasjen.

2



Ta den nye testkassetten ut av plastemballasjen.

3



Åpne beskyttelsesluken.

4



Skv sikkerhetslåsen for kassettdেকেlet oppover i pilens retning.

5



Sett testkassetten inn i apparatet. Lukk kassettdেকেlet ved å trykke det ned. Lukk beskyttelsesluken.

6




Trekk batterienes beskyttelsesfolie bakover og ut av apparatet. Trekk beskyttelsesfolien av skjermen.

7



Trykk  i ca. 2 sekunder, til apparatet slår seg på.

8

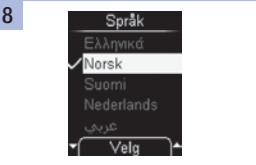

Velg et språk (markert med gult) med  .

Trykk .

9



Trykk .

2. Klargjøre blodprøvetakeren

1



Trekk hetten av blodprøvetakeren.

2



Sett inn den nye lansettrommelen med den hvite enden foran.



Lansettrommelen skal **ikke** fjernes før alle 6 lansettene er brukt opp.






Lansettrommelen er satt inn riktig, når den sitter helt inne i blodprøvetakeren og bare den fremspringende randen stikker ut foran.

3



Sett hetten på igjen.

Hetten er satt på riktig, når den er skjøvet på til den stopper, og har gått i lås med et hørbart og følbart klikk.

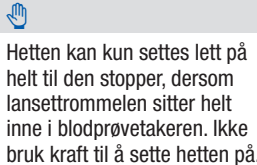

Hetten kan kun settes lett på helt til den stopper, dersom lansettrommelen sitter helt inne i blodprøvetakeren. Ikke bruk kraft til å sette hetten på. Det kan føre til skade på hetten og blodprøvetakeren. Istedenfor korrigerer du lansettrommelens posisjon.

4



Drei hetten, helt til den ønskede stikkedybden står ved markeringen.

Tips: Begynn med en middels stikkedybde, f.eks. 3, når du tar blodprøven.

5



Klargjør en ny lansett: Klargjør blodprøvetakeren for den neste blodprøven:

Beveg spaken **1** i retning av **A** og tilbake igjen i retning av **B**.

3. Utføre en blodsuktermåling

Før du utfører en blodsuktermåling for første gang: Følg de viktige henvisningene om blodsuktermåling.

1



Vask hendene med varmt vann og såpe og skyll dem godt av.

2



Tørk hendene grundig med et rent håndkle før du tar blodprøver.

3



Åpne beskyttelsesluken.

4



Trykk blodprøvetakeren fast mot det valgte innstikkstedet.

5



Trykk utløserknappen helt ned.

6



Berør midten av testfeltet lett og jevnt med blodråpen.

7



Ta fingeren bort fra testfeltet, så snart *Måling pågår* vises på skjermen.

8



Målingen er avsluttet etter ca. 5 sekunder. Les av måleresultatet og lukk beskyttelsesluken.

Kundesenter

Norge
Accu-Chek Kundesenter: 815 00 510
www.accu-chek.no

Sist oppdatert: 2015-02

 0088

© 2015 Roche Diabetes Care

ACCUCHEK, ACCUCHEK MOBILE og FASTCLIX er varemerker for Roche.

 Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com