



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK FLEXLINK
are trademarks of Roche.



Disetronic Medical Systems AG
CH-3401 Burgdorf, Switzerland
www.disetronic.com

04537246001/V02/04.05

ACCU-CHEK[®]

FlexLink


INFUSION SET



ACCU-CHEK[®]

FlexLink

INFUSJONSSETT

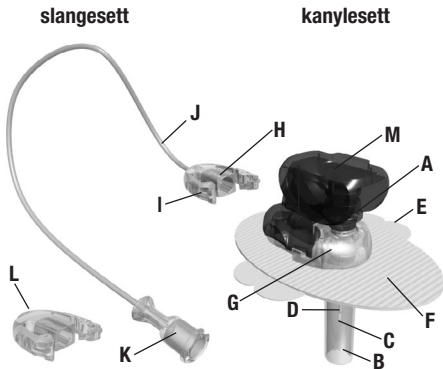

Bruksområde

Accu-Chek FlexLink er et infusjonssett til subkutan infusjon av insulin som injiseres med insulinpumper som leverer mikrodoser.

Innholdet i Accu-Chek FlexLink-pakkene

Pakke 1 kanylesett og slangesett

- A** holder til innføringsnål
- B** beskyttelseskappe
- C** innføringsnål
- D** myk kanyle
- E** klebende støtte
- F** selvklebende plaster

G kanylehus

H koplingsstykke

I sideklemme på koplingsstykket

J slange

K luerlås

L beskyttelseskappe ved frakopling

M blå holderkappe

Pakke 2 kanylesett

Komponentene A–G, L og M fra pakke 1

Må kun brukes sammen med slangesettet fra pakning 1.

ADVARSLER

Les bruksanvisningen nøye før bruk. Se insulinpumpens håndbok for opplysninger om pumpebehandling.

Ved første gangs bruk må helsepersonell være til stede for å gi instruksjoner.

- Dette produktet er sterilt, med mindre pakningen er blitt åpnet eller skadet. Skal ikke brukes dersom den sterile pakningen er blitt åpnet eller skadet.
- Beskytt produktet mot for mye fuktighet, sollys og varme. Skal oppbevares ved romtemperatur.

- Kast alltid settet etter bruk. Det skal ikke rengjøres eller steriliseres på nytt.
- Accu-Chek FlexLink er bare til subkutan bruk.
- Sett alltid luerlåsen godt fast i adapteren. Hvis dette ikke gjøres, er det fare for lekkasje som følge av løs forbindelse mellom infusjonssettet og pumpen. Bruk aldri verktøy til å skru luerlåskoplingen på plass med. Ellers kan luerlåskoplingen bli skadet.
- La det aldri være igjen luftbobler i Accu-Chek FlexLink. Fyll helt opp.
- En liten prosentdel av Accu-Chek FlexLink med myke kanyler kan krumme seg under innføringen eller bli forskjøvet under bruken.

Dersom dette problemet skulle oppstå i ditt tilfelle, må du øyeblikkelig ta en ny Accu-Chek FlexLink i bruk.

- Kontroller ofte for å forvisse deg om at den myke kanylen holder seg godt på plass. Fordi kanylen er så myk, merker du ingen smerte dersom den trekkes ut. Den myke kanylen må alltid være satt fullstendig inn, slik at hele medikasjonsvolumet overføres. Skift ut Accu-Chek FlexLink så snart det selvklebende plasteret begynner å løsne.
- Ikke sett innføringsnålen inn i den myke kanylen igjen. Dersom dette gjøres, kan den myke kanylen revne, noe som igjen vil føre til ukontrollert innstrømning av medikasjonen.

- Hvis du må kople fra Accu-Chek FlexLink, må du være nøye med hygien.
- En myk kanyle skal aldri brukes i mer enn 72 timer (3 dager). Bruk aldri slangesettet i mer enn 6 dager. Når du bytter ampulle, må du forsikre deg om at slangesettet er fylt ordentlig før det koples til kanylesettet.
- Dersom infusjonsstedet blir betent, må Accu-Chek FlexLink skiftes ut og kanylesettet må settes på et nytt sted.
- Du må sørge for at din Accu-Chek FlexLink verken kommer i kontakt med desinfeksjonsmidler, parfyme eller deodoranter, fordi disse kan gjøre skade på settet.

- Du må aldri fylle slangesettet eller forsøke å åpne en tilstoppet ledning mens slangesettet er koplet til kanylesettet. Du kan uforvarende komme til å injisere en ukontrollert mengde insulin.
- Unngå mekaniske belastninger på infusjonsstedet og på Accu-Chek FlexLink. Vær forsiktig når du bærer tungt.
- Før du setter inn Accu-Chek FlexLink, må du klargjøre infusjonsstedet i samsvar med instruksene fra helsepersonellet.
- Sjekk blodsukkernivået 1–3 timer etter at Accu-Chek FlexLink er satt inn og kontroller infusjonsstedet regelmessig. Sett aldri inn en ny myk kanyle like før du legger deg.

Kontroller blodsukkeret ofte (rådfør deg med din lege).

- Dersom blodsukkernivået stiger av uforklarlige grunner, eller det gis en tilstoppingsalarm, må du kontrollere med hensyn til tilstoppinger og lekkasjer. Bytt Accu-Chek FlexLink hvis du er usikker.

Innføring av Accu-Chek FlexLink

Illustrasjon 1

Velg et sted som ligger utenfor beltestedet, ben, arret hudvev, navlen og ferske infusjonssteder. Vask hendene og infusjonsstedet etter instruks

fra ditt helsepersonell. La infusjonsstedet tørke, før den myke kanylen settes inn.

Illustrasjon 2

Mens du holder den blå holderkappen (M) til Accu-Chek FlexLink med tommelen og langfingeren, fjerner du den transparente beskyttelseskappen (B) ved å dra i den og vri den. Behold beskyttelseskappen til senere bruk for å kaste innføringsnålen (C) på en forsvarlig måte.

Illustrasjon 3

Fjern begge delene til den klebende støtten (E) fra det selvklebende plasteret (F).

Illustrasjon 4

Klyp i det subkutane hudvevet. Sett innføringsnålen (C) og den myke kanylen (D) raskt og rett inn ved infusjonsstedet, i en vinkel på 90°. Hold øye med den myke kanylen mens du setter den inn, slik at du er sikker på at den går rett inn uten å bukte eller krumme seg.

⚠ ADVARSLER

Sørg for ren påføring. Ikke berør den myke kanylen eller innføringsnålen. Pass på at den myke kanylen er satt helt inn i det subkutane hudvevet og at den ikke bukter seg på hudoverflaten. Så snart innføringsnålen trenger inn i huden, må den myke kanylen raskt skyves helt inn, ellers

kan den bukte seg mens den settes inn, noe som da fører til at injiseringen av medikasjonen reduseres eller blokkeres.

Illustrasjon 5

Bre det selvklebende plasteret (F) godt ut på huden og la fingrene dine gli over dette, forsikre deg om at det sitter godt fast på huden.

Illustrasjon 6

Hold det selvklebende plasteret (F) på plass, trykk forsiktig på sideklemmene på den blå holderkappen (M), og trekk den fra kanylehuset (G).

Illustrasjon 7

Hold det selvklebende plasteret (F) på plass, trykk sideklemmene til frakoplingskappen (L) forsiktig og trekk den fra kanylehuset (G).

Oppbevar frakoplingskappen tilgjengelig for senere bruk når Accu-Chek FlexLink frakoples.

Illustrasjon 8

Fest luerlåsen (K) på pumpen ved å sette den godt inn i adapteren. Gå frem etter pumpeproducentens brukerhåndbok når du skal fylle slangesettet. Fyll slangesettet helt til medikasjonen drypper ut av spissen på forbindelsesnålen. Det må ikke finnes luftbobler verken i ampullen eller i slangesettet. Kople slangesettet sammen med

kanylesettet som nettopp er satt inn, og fyll tomrommet i kanylehuset med en bolus på 1,0 enheter (U100-insulin).

ADVARSLER

Du må fylle tomrommet i kanylesettet som nettopp er satt inn, etter at slangesettet er tilkople. Dersom dette ikke gjøres, blir resultatet tapt insulin.

Hvis koplingen ikke låses med et merkbart og hørbart klikk, bruker du et nytt kanylesett og et nytt slangesett.

Bruk aldri verktøy til å skru luerlåskoplingen på plass med.

Påfyllingsmengde Slangesett:

12"/ 30 cm:	ca. 6 enheter*	ca. 60 µl
24"/ 60 cm:	ca. 11 enheter*	ca. 110 µl
31"/ 80 cm:	ca. 14 enheter*	ca. 140 µl
43"/110 cm:	ca. 18 enheter*	ca. 180 µl

Påfyllingsmengde Kanylesett:

ca. 1,0 enheter*	ca. 10 µl
------------------	-----------

* U 100-insulin

ADVARSLER

Bytt kanylesett med 2–3 dagers mellomrom (maks. 72 timer) Ellers risikerer du insulinresistens eller at infusjonsstedet kan bli betent. Bruk aldri slangesettet i mer enn 6 dager.

Frakopling av Accu-Chek FlexLink

ADVARSLER

Vennligst rådfør deg med helsepersonellet ditt når det gjelder hvordan det kan kompenseres for tapt insulin i den tiden pumpen er frakoplet. Overvåk blodsukkernivået nøye når du er koplet fra pumpen og etter at du har koplet til igjen.

Accu-Chek FlexLink gir deg muligheten til å frakople pumpen når du vil dusje, svømme etc., uten at du må skifte ut Accu-Chek FlexLink. Hold det selvklebende plasteret (F) på plass, trykk sideklemmene på koplingen forsiktig (I) og trekk koplingen (H) fra kanylehuset (G).

Sett frakoplingskappen (L) på kanylehuset.

Ny tilkopling av Accu-Chek FlexLink

ADVARSLER

Før ny tilkopling må du passe på at en dråpe av medikasjonen er synlig på spissen av forbindelsesnålen.

Fyll opp Accu-Chek FlexLink inntil medikasjonen siver ut av forbindelsesnålen.

Hold det selvklebende plasteret (F) på plass og fjern frakoplingskappen ((L) fra kanylehuset (G). Sett koplingen (H) på kanylehuset igjen. Et hørbart "klikk" betyr at koplingen er låst.

ADVARSLER

Det er ikke nødvendig å gi noen ekstra bolus.

Distribuert av:

Roche Norge AS

Divisjon Diagnostics

PB 6610 Etterstad

Brynsengfarete 6 B

NO-0607 Oslo

Telefon +47 23 37 33 00

Fax +47 23 37 33 99

www.accu-chek.no